

kardiomed[®] **521 boosted**

Gebrauchsanleitung

Allgemeines



Lesen Sie die vorliegenden Hinweise mit allen Sicherheitshinweisen und Warnungen **vor dem ersten Gebrauch** genau durch, um eine sichere und bestimmungsgemäße Nutzung zu gewährleisten. Bewahren Sie dieses Dokument auf, um nachschlagen zu können und geben Sie es im Falle einer Weitergabe des Gerätes mit.

Übersicht

Alle kardiomed® 521 Geräte können mit einer Nutzergewichtserhöhung ausgestattet werden. Diese boosted-Versionen sind an verschiedenen Stellen mit zusätzlichen Elementen verstärkt, wodurch die Geräte noch robuster sind. Außerdem bieten Sie Nutzern mit einem hohen Gewicht einen besseren Komfort.

Gerät	zugelassenes Nutzergewicht	Besonderheiten
Boosted Basic Cycle/Diagnostic Cycle	200 kg	div. Module zur Verstärkung
Boosted Cross Walk	200 kg	div. Module zur Verstärkung
Boosted Upper Body Cycle	200 kg	div. Module zur Verstärkung
Boosted Comfort Cycle	250 kg	mit Drehsitz, erhöhten Lehnen und div. Modulen zur Verstärkung

Pflege und Wartung

Das Sicherheitsniveau der Geräte kann nur dann gehalten werden, wenn die Geräte regelmäßig auf Schäden und Verschleiß geprüft werden. Defekte Teile sind sofort auszutauschen und das Gerät ist still zu legen bis zur Instandsetzung.

Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Nutzung, mindestens jedoch täglich, visuell und achten Sie besonders auf defekte Teile, lockere Verbindungen, atypische Geräusche. **Je nach Nutzung, spätestens aber nach 3 Monaten, muss das Gerät einer intensiven Überprüfung unterzogen werden.** Dabei sollten alle sichtbaren Verbindungen wie auch Schweißnähte visuell geprüft werden und das Gerät gründlich gereinigt werden.

Reinigen Sie die Plastikverkleidung und die Rahmenteile regelmäßig nach Bedarf mit feuchtem Lappen und milder Seife, um aggressive Schweißrückstände zu entfernen. Danach wieder trocken reiben.

Die Nutzung von Sprühflaschen mit Reinigungsmitteln ist nicht erlaubt; es hat sich gezeigt, dass die Geräte an unzugänglichen Stellen niemals trocken werden. Ein Rostbefall ist durch diese Vorgehensweise nicht auszuschließen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Monitorgehäuse gelangt und dort empfindliche Elektronikkomponenten beschädigt.

Zu einer eventuell nötigen Desinfektion der Geräte verwenden Sie bitte ausschließlich acryl-des® Desinfektionstücher.

Achtung: Nachziehen der Kurbeln und Pedale

Nach den ersten 10 Betriebsstunden der Kurbeln und Pedale müssen diese zwingend nachgezogen werden. Wenn die Pedale und Kurbeln nicht nachgezogen werden, können Beschädigungen an der Achse, den Kurbeln oder den Pedalen auftreten, wobei in diesem Fall keine Gewährleistung mehr besteht.

Gewährleistung

Zu Grunde liegen die AGB von proxomed für Mängelgewährleistung, soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde.

Unsere allgemeinen Verkaufs- und Zahlungsbedingungen (AGB) in Ihrer jeweils aktuellen Fassung, können auf unserer Internetseite eingesehen werden.

<http://www.proxomed.de/de/unternehmen/agblieferbedingungen/>

Entsprechend unseren Garantiebestimmungen, die ebenfalls in Ihrer jeweils aktuellen Fassung auf unserer Internetseite einsehbar wird dies erweitert:

<http://www.proxomed.de/de/service/garantiebedingungen/>

Die Gewährleistung/Garantie erlischt, wenn ohne ausdrückliche Anweisung Bauartveränderungen am Gerät ausgeführt werden oder diese durch nicht autorisiertes Fachpersonal durchgeführt wird.

Sobald ein Gewährleistungs-/Garantiefall eintritt, sollten Sie umgehend die Service Hot Line der proxomed unter der Telefonnummer

+49 (6023) 9168 77 benachrichtigen.

proxomed[®] wird umgehend einen Service veranlassen, behält sich jedoch die Art des Einsatzes vor. Folgende Vorgehensweisen sind denkbar.

1. Der Service wird vor Ort von unserem Service vorgenommen.
2. Wir senden das gewünschte Ersatzteil.
3. Wir senden ein Austauschgerät.

Die defekten Teile werden innerhalb von 48 Stunden durch den Kunden an uns zurückgesandt. Anderenfalls erfolgt die Berechnung der gelieferten Ersatzteile.

Falls die Ursachen außerhalb des Gewährleistungs-/Garantiebereiches liegen, so behält sich proxomed die Berechnung aller Reparaturkosten vor.

Verschleißteile unterliegen nicht der Gewährleistung und Garantie.

Dies sind insbesondere Overlay/Tastaturfolie, Sattel, Kurbeln und Kurbelbefestigung, Pedale, Pedalschlaufen, Akkus, Fußtritte, Polsterstoffe und der Griffgummi am Lenker

Die Polar Pulssysteme sind mit der gesetzliche Gewährleistung ausgestattet.

Hersteller im Sinne des MPG  0633
emotion fitness GmbH & Co KG
Trippstadter Str. 68
67691 Hochspeyer
Telefon: +49 (0)6305-71499-0
Telefax: +49 (0)6305-71499-111
E-Mail: info@emotion-fitness.de

Exklusiver Vertrieb der proxomed[®] kardiomed[®] 521 Geräte

proxomed[®] Medizintechnik GmbH
Daimlerstraße 6
63755 Alzenau
Telefon : +49 (0)6023 9168-0
Telefax : +49 (0)6023 916868

Internet : www.proxomed.de
E-mail : info@proxomed.com

Hauptsitz Deutschland:

proxomed® Medizintechnik GmbH

Daimlerstraße 6

D-63755 Alzenau

Tel.: +49 6023 9168-0

Fax: +49 6023 9168-68

www.proxomed.de

info@proxomed.de

Office Schweiz:

proxomed® Medizintechnik

Seestrasse 161

CH-8266 Steckborn

Tel.: +41 52762 1300

Fax: +41 52762 1470

www.proxomed.ch

info@proxomed.ch

Änderungen:

proxomed® behält sich das Recht vor, Produkte zu ändern, wenn diese Maßnahmen aus unserer Sicht zu einer Qualitäts- und Funktionsverbesserung führen. Alle Abbildungen in dieser Gebrauchsanweisung sind aus drucktechnischen Gründen nur angenähert; für Schreibfehler übernehmen wir keine Haftung. Irrtum vorbehalten

Gebrauchsanleitung kardiomed® 521 boosted,
gültig ab: Sept. 2015

10322300, kardiomed 521 basic cycle bis 200 kg belastbar⁽¹⁾
10322100, kardiomed 521 diagnostic cycle bis 200kg belastbar⁽¹⁾
10322900; kardiomed 521 cross walk bis 200 kg belastbar⁽¹⁾

10322700; kardiomed 521 upper body cycle bis 200kg belastbar⁽¹⁾

⁽¹⁾ zusätzliche Gebrauchsanweisung kardiomed 521® boosted für die Geräte,

emotion fitness GmbH & Co KG ist ein durch
Berlin Cert GmbH zertifiziertes Unternehmen

CE 0633



proxomed® ist ein durch die
TÜV SÜD Product Service GmbH zertifiziertes
Unternehmen.