

kardiomed[®] 521/530

V-Kurbel Gebrauchsanleitung


Allgemeines



Lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanleitung mit allen Sicherheitshinweisen und Warnungen **vor dem ersten Gebrauch** genau durch, um eine sichere und bestimmungsgemäße Nutzung zu gewährleisten. Bewahren Sie dieses Dokument auf, um nachschlagen zu können und geben Sie es im Falle einer Weitergabe des Gerätes mit.

Übersicht

- Cycle: Radius verstellbar zwischen 75mm und 175mm
- Upper Body: Radius verstellbar zwischen 75mm und 225mm, Umstellung von Asynchron- auf Synchronposition der Griffe möglich
- Komplett aus rost- und säurebeständigem Edelstahl gefertigt
- Sichere und einfache Verstellung – ohne Werkzeug
- Äußerst robuste Ausführung

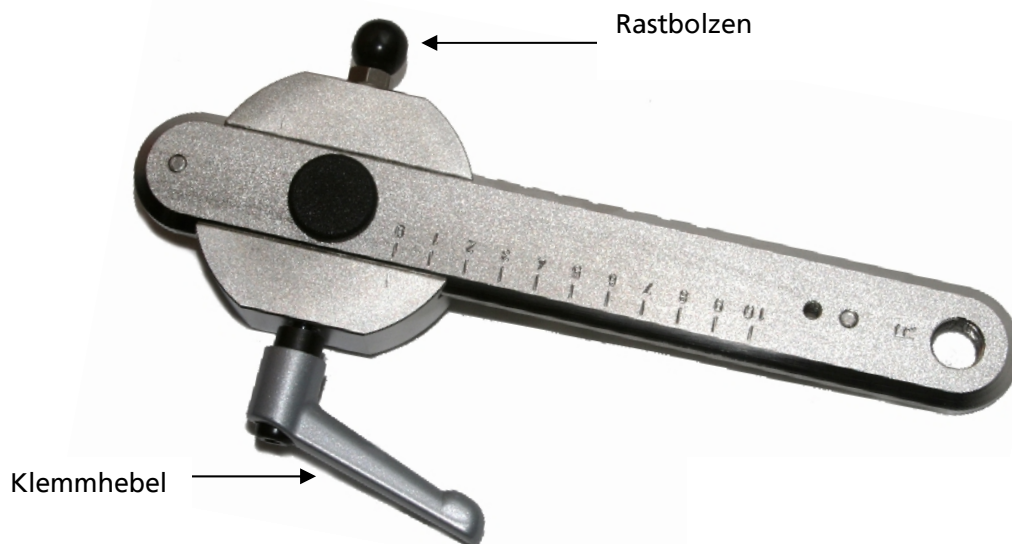

Pflege und Wartung

Achtung: Nachziehen der Kurbeln und Pedale

Nach den ersten 10 Betriebsstunden der Kurbeln und Pedale müssen diese zwingend nachgezogen werden. Wenn die Pedale und Kurbeln nicht nachgezogen werden, können Beschädigungen an der Achse, den Kurbeln oder den Pedalen auftreten, wobei in diesem Fall keine Gewährleistung mehr besteht.

Montageanleitung

Für die Montage benötigte Werkzeuge:

- Schlitzschraubendreher klein
- Maulschlüssel SW 15 / 17 / 19
- 6-kant Steckschlüsseleinsatz SW 14
- Kurbelabzieher
- Drehmomentschlüssel eingestellt auf 50Nm

Schritt 1 - Entfernen der Pedale

Entfernen Sie mit Hilfe des Maulschlüssels SW15 auf der linken und rechten Seite die Pedale. **Achtung:** Auf der linken Seite öffnet sich die Verschraubung im UZS, auf der rechten Seite gegen den UZS.

Schritt 2 – Lösen der Verschraubung der Kurbeln mit der Achse

Entfernen Sie mit Hilfe des kleinen Schlitzschraubendrehers rechts und links die kleine schwarze Plastikkappe, die die Verschraubung der Kurbel abdeckt. Lösen Sie nun auf beiden Seiten die Verschraubungen mit Hilfe des Drehmomentschlüssels und des 6-kant-Steckschlüsseleinsatzes SW 14.

Schritt 3 - Abziehen der Kurbeln von der Achse

Schrauben Sie den Abzieher mit der Hand in das Gewinde an der Achsbefestigung. Drehen Sie mit dem Maulschlüssel SW 17 die Schraube des Abziehers solange im UZS, bis sich die Kurbel gelöst hat, die Kurbel kann nun leicht entfernt werden. Entfernen Sie den Abzieher mit dem Maulschlüssel SW19 von der Kurbel und bringen ihn wieder in die Ausgangsposition durch Drehen gegen den UZS. Verfahren Sie mit der Kurbel auf der anderen Seite ebenso.

Schritt 4 - Montieren der verstellbaren Kurbeln


Entfernen Sie die schwarzen Abdeckkappen von den Öffnungen der beiden Kurbeln. Falls die Kurbeln noch nicht auf Pos. 0 eingestellt sind, bringen Sie diese durch Öffnen des Klemmhebels und Ziehen des Entriegelungsknopfes auf die für die Montage notwendige Pos. 0. Die Kurbeln sind mit einem L für die linke Seite und mit einem R für die rechte Seite markiert, bitte achten Sie auf die richtige Position, da sich ansonsten die Pedale lösen können. Setzen Sie die Kurbel mit dem L auf der linken Seite auf den Vierkant der Achse. Schrauben Sie jetzt die vorhin entfernte Schraube mit dem Drehmomentschlüssel wieder in die Achse ein und ziehen Sie diese mit 50 Nm an. Verfahren Sie auf der anderen Seite ebenso.

Schritt 5 - Montieren der Pedale

Die Pedale sind ebenfalls mit L für links und R für rechts gekennzeichnet. Achten Sie bei der Montage auf die richtige Position und darauf, dass auf der linken Seite gegen den UZS eingeschraubt und auf der rechten Seite im UZS eingeschraubt wird. Ziehen Sie die Pedale sehr fest an, da ansonsten ein Lösen der Pedale möglich ist.

Benutzung der V-Kurbel

Wie in Schritt 4 kurz angedeutet lassen sich die V-Kurbeln durch Lösen des Klemmhebels (A) und durch Ziehen des Entriegelungsknopfes (B) in der Länge verstellen. Durch die seitlich angebrachte Skala lässt sich die Position der Kurbel ablesen. Nach dem Verstellen der Kurbel ist zwingend darauf zu achten, dass der Entriegelungsknopf (B) eingerastet und der Klemmhebel (A) festgestellt ist und fluchtend zur Kurbel (siehe Bild) steht. Um eine fluchtende Position des Klemmhebels zu erreichen, kann dieser in verriegelter Position leicht angehoben und in die gewünschte Position gebracht werden. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen des Trainierenden oder zu Beschädigungen an Kurbel und Gerät führen.

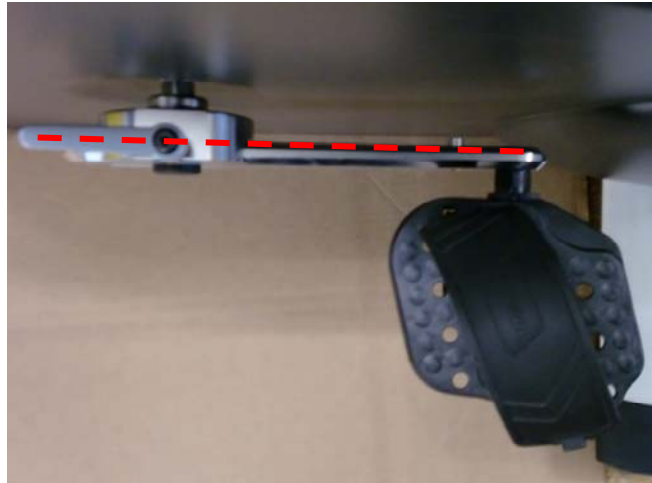

Gewährleistung

Zu Grunde liegen die AGB von proxomed für Mängelgewährleistung, soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde.

Unsere allgemeinen Verkaufs- und Zahlungsbedingungen (AGB) in Ihrer jeweils aktuellen Fassung, können auf unserer Internetseite eingesehen werden.

<http://www.proxomed.de/de/unternehmen/agblieferbedingungen/>

Entsprechend unseren Garantiebestimmungen, die ebenfalls in Ihrer jeweils aktuellen Fassung auf unserer Internetseite einsehbar wird dies erweitert:

<http://www.proxomed.de/de/service/garantiebedingungen/>

Die Gewährleistung/Garantie erlischt, wenn ohne ausdrückliche Anweisung Bauartveränderungen am Gerät ausgeführt werden oder diese durch nicht autorisiertes Fachpersonal durchgeführt wird.

Sobald ein Gewährleistungs-/Garantiefall eintritt, sollten Sie umgehend die Service Hot Line der proxomed unter der Telefonnummer

+49 (6023) 9168 77 benachrichtigen.

proxomed[®] wird umgehend einen Service veranlassen, behält sich jedoch die Art des Einsatzes vor. Folgende Vorgehensweisen sind denkbar.

1. Der Service wird vor Ort von unserem Service vorgenommen.
2. Wir senden das gewünschte Ersatzteil.
3. Wir senden ein Austauschgerät.

Die defekten Teile werden innerhalb von 48 Stunden durch den Kunden an uns zurückgesandt. Anderenfalls erfolgt die Berechnung der gelieferten Ersatzteile.

Falls die Ursachen außerhalb des Gewährleistungs-/Garantiebereiches liegen, so behält sich proxomed die Berechnung aller Reparaturkosten vor.

Verschleißteile unterliegen nicht der Gewährleistung und Garantie.

Dies sind insbesondere Overlay/Tastaturfolie, Sattel, Kurbeln und Kurbelbefestigung, Pedale, Pedalschlaufen, Akkus, Fußtritte, Polsterstoffe und der Griffgummi am Lenker

Die Polar Pulssysteme sind mit der gesetzliche Gewährleistung ausgestattet.

Hersteller im Sinne des MPG  0633
emotion fitness GmbH & Co KG
Trippstadter Str. 68
67691 Hochspeyer
Telefon: +49 (0)6305-71499-0
Telefax: +49 (0)6305-71499-111
E-Mail: info@emotion-fitness.de

Exklusiver Vertrieb der proxomed[®] kardiomed[®] 521 Geräte

proxomed[®] Medizintechnik GmbH
Daimlerstraße 6
63755 Alzenau
Telefon : +49 (0)6023 9168-0
Telefax : +49 (0)6023 916868

Internet : www.proxomed.de
E-mail : info@proxomed.com

Hersteller Hauptsitz Deutschland:

proxomed® Medizintechnik GmbH

Daimlerstraße 6

D-63755 Alzenau

Tel.: +49 6023 9168-0

Fax: +49 6023 9168-68

www.proxomed.de

info@proxomed.de

Niederlassung Schweiz:

proxomed® Medizintechnik

Seestrasse 161

CH-8266 Steckborn

Tel.: +41 52762 1300

Fax: +41 52762 1470

www.proxomed.ch

info@proxomed.ch

Änderungen:

proxomed® behält sich das Recht vor, Produkte zu ändern, wenn diese Maßnahmen aus unserer Sicht zu einer Qualitäts- und Funktionsverbesserung führen. Alle Abbildungen in dieser Gebrauchsanweisung sind aus drucktechnischen Gründen nur angenähert; für Schreibfehler übernehmen wir keine Haftung. Irrtum vorbehalten.



proxomed® ist ein durch die TÜV SÜD Product Service GmbH zertifiziertes Unternehmen.

Gebrauchsanweisung kardiomed® 521/530, V 1.8 / 15.05.2014

Artikelnummer: